



**VostraMed**  
Medical Technology

**Bestellinformation:**

**EXVASIN™**

EXVASIN™ ist eine Handelsmarke von VostraMed. Die Bilder befinden sich im Besitz von VostraMed. Alle Darstellungen sind graphische Darstellungen und keine technischen Zeichnungen oder Fotos. Die Anwendung des beschriebenen Produktes soll nur von fachlich kompetenten Anwendern, welche mit dem Einsatz und möglichen Komplikationen beim Einsatz des Produktes vertraut sind durchgeführt werden. Vor Gebrauch Gebrauchsanleitung betreffend Warnhinweise und möglicher Komplikationen lesen. Der Zulassungsstatus vor Inverkehrbringung ausserhalb der Gültigkeit des CE-Zertifikates ist zu prüfen.

© 2017 VostraMed. Alle Rechte vorbehalten. 10020-002/003-2019-10

Bestellnummer (EAN)	Beschreibung
7629999041271	EXVASIN™ M VE (20x)
1 Verkaufseinheit enthält 20 Stk. EXVASIN™	

**Händler:**

**Für mehr Information:**  
VostraMed AG  
Baarermattstrasse 6  
CH-6340 Baar  
Schweiz  
Telefon: +41 41 552 25 10  
www.vostramed.ch



**VostraMed**  
Medical Technology

**EXVASIN™**  
Externer  
vaskulärer  
Punktions-  
verschluss

Selektive Kompression des Blutgefässes ermöglicht sicheren Blutrückfluss

Transparenz ermöglicht jederzeit Kontrolle der Punktionsstelle


Elastisch – Hygienisch – Schnell

Vaskulären Eingriff in gewohnter Form durchführen. Gefäßzugang im Gefäß belassen. Erwartete Klebestellen sollen fettfrei und trocken sein.



Gefäßschleuse ca 2-3cm aus dem Blutgefäß ziehen. Verschlusselement mittig über Einstichkanal positionieren. Um die gewünschte Wirkung zu erzielen muss EXVASIN™ zirkulär aufgeklebt werden.

Gefäßschleuse zügig entfernen und für eine kurze Dauer manuell komprimieren.

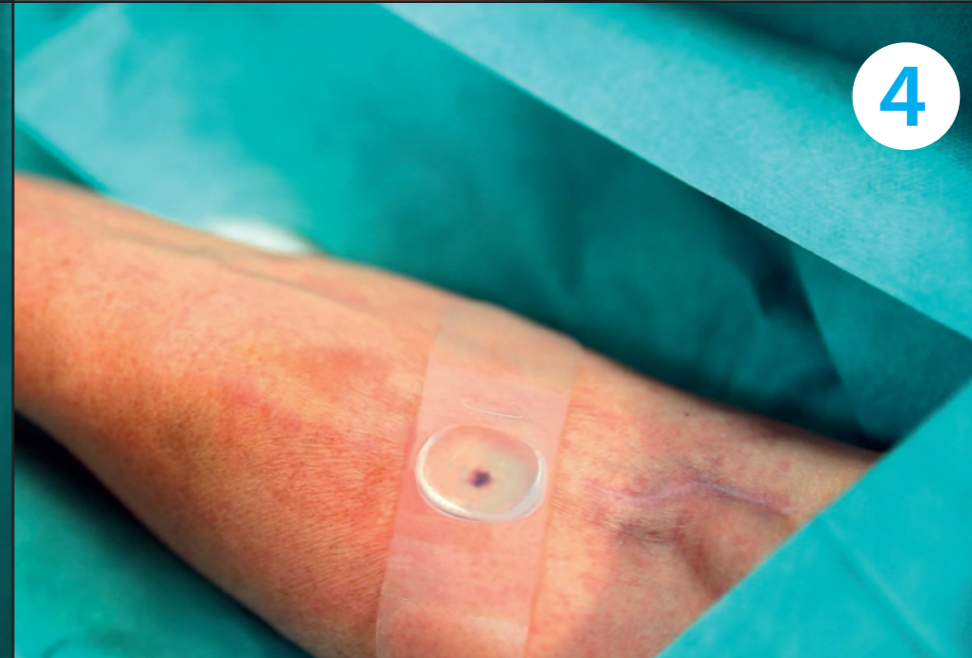

EXVASIN™ soll so appliziert werden, dass bei Hämostase ein kontinuierlicher Blutfluss möglich ist.

**Indikation:** EXVASIN™ ist als Hilfsmittel zum Erzielen und Aufrechterhalten der Hämostase nach Punktionen oberflächlich liegender Gefäß vorgesehen. Dies schliesst die Versorgung oberflächlicher vaskulärer Punktionen in der Allgemeinmedizin (z. B. oberflächliche vaskuläre Punktionen im Rahmen ambulanter Notfallversorgung sowie

postoperative und intensivmedizinische Versorgung) und nach diagnostischen oder therapeutischen vaskulären Eingriffen in der Radiologie und Kardiologie. EXVASIN™ ist als Ersatz für, bzw. zur Verkürzung, der manuellen bzw. zirkulären Kompression vaskulärer Punktionsstellen mit einem Durchmesser bis zu 2.5mm, vorgesehen.

